



Kurzbedienungsanleitung

Dies ist eine verkürzte Handhabungsanleitung. Bitte beachten Sie auch die ausführliche Bedienungsanleitung, die jeder JuniorSTAR®-Packung beiliegt.

1. Patrone einsetzen

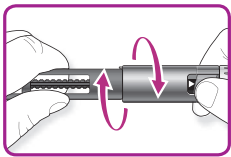

A Ziehen Sie die Penkappe ab.

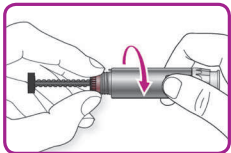


B Drehen Sie die Patronenhülse vom Gehäuse ab.

– Entnehmen Sie gegebenenfalls die leere Insulinpatrone.

C Drehen Sie die Gewindestange vollständig in die Ausgangsposition zurück.


– Drücken Sie den Injektionsknopf vollständig ein, falls im Dosisfenster nicht „0“ steht.
– Halten Sie den Gewindestangenring fest.
– Drehen Sie **das Gehäuse** bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn; dabei wird die Gewindestange vollständig zurückgeschraubt.

✧ **Versuchen Sie nicht, die Gewindestange zurückzuschieben.**

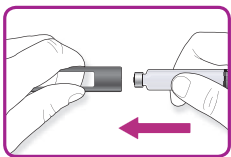

D Setzen Sie eine neue Patrone ein.


– Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Insulin verwenden und legen Sie dann die neue Patrone ein.

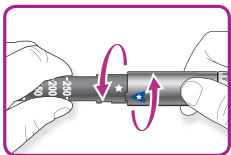

E Schrauben Sie die Patronenhülse wieder fest an das Gehäuse.

2. Nadel aufsetzen

✧ **Überprüfen Sie bitte zunächst, ob das richtige Insulin verwendet wird.**

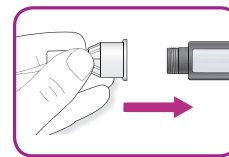


A Setzen Sie die Nadel gerade auf.

– Achten Sie darauf, dass die Nadel fest sitzt (je nach Nadeltyp wird diese aufgeschraubt oder aufgesteckt).

3. Sicherheitstest durchführen

✧ **Führen Sie vor jeder Injektion den Sicherheitstest durch, um Luftblasen zu entfernen und die ordnungsgemäße Funktion von Pen und Nadel zu prüfen.**

A Stellen Sie durch Drehen des Dosierings **2 Einheiten ein** und nehmen Sie die Nadelschutzkappen ab.

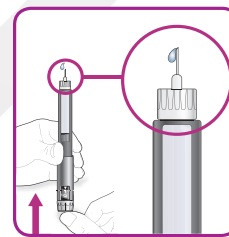

B Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben und drücken Sie den Injektionsknopf vollständig ein.

C Prüfen Sie, ob an der Nadelspitze Insulin austritt.



Achtung: Die Markierungen auf der Patronenhülse und dem Gehäuse müssen einander genau gegenüberliegen. Falls das nicht der Fall ist, beginnen Sie noch einmal bei Schritt C.


Wenn Sie die Patrone nicht einsetzen können, überprüfen Sie, ob:

- ✧ Die Patrone richtig herum eingelegt ist.
- ✧ Die Gewindestange vollständig zurückgedreht ist.
- ✧ Wenden Sie keine Gewalt an.

Achtung: Eventuell müssen Sie den Sicherheitstest mehrmals wiederholen, bis Insulin austritt. Falls nach dreimaligem Sicherheitstest kein Insulin austritt:

- ✧ **Wechseln Sie die Nadel und versuchen es erneut.**
- ✧ **Überprüfen Sie, dass die Patrone korrekt eingesetzt und nicht beschädigt ist.**
- ✧ **Wiederholen Sie den Sicherheitstest.**

4. Dosis einstellen

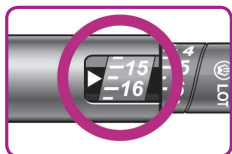


A Achten Sie nach dem Sicherheitstest darauf, dass im Dosisfenster „0“ angezeigt wird.

B Drehen Sie am Injektionsknopf und stellen Sie die gewünschte Dosis ein. In dem gezeigten Beispiel wurde eine Dosis von 15,5 Einheiten gewählt. Ihre Dosis kann davon abweichen.

Achtung: Wenn sich die gewünschte Dosis nicht einstellen lässt, prüfen Sie, ob sich genügend Insulin in der Patrone befindet!


5. Dosis injizieren

☆ Wenden Sie die Injektionstechnik an, die Ihnen vom medizinischen Fachpersonal gezeigt wurde.

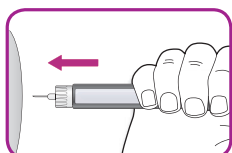


A Stechen Sie die Nadel ein.

B Injizieren Sie die eingestellte Dosis, indem Sie den Injektionsknopf langsam vollständig eindrücken. Die im Dosisfenster angezeigte Zahl geht dabei auf „0“ zurück.

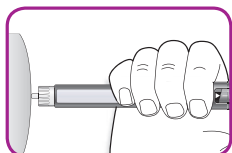


C Halten Sie den Injektionsknopf vollständig eingedrückt.
– Zählen Sie langsam bis 10, bevor Sie die Nadel aus der Haut ziehen.

6. Nadel entfernen

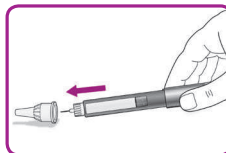

A Legen Sie die äußere Nadelschutzkappe auf eine ebene Fläche. Führen Sie die Nadel in die äußere Nadelschutzkappe ein.

Um sich nicht versehentlich an der Nadel zu verletzen, versuchen Sie nicht, die innere Nadelschutzkappe wieder aufzustecken.

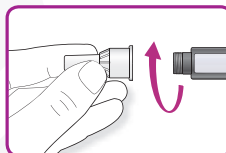

B Drücken Sie die äußere Nadelschutzkappe etwas zusammen, um die Nadel zu greifen, und drehen Sie mit ihrer Hilfe die Nadel vom JuniorSTAR[®] ab. Halten Sie dabei den Pen an der Patronenhülse fest.

C Entsorgen Sie die Nadel sicher (z. B. in einem durchstichsicheren Behälter).

D Setzen Sie stets die Penkappe wieder auf den Pen und bewahren Sie ihn sicher auf.

Achtung: Wenn Sie die Injektion einer anderen Person verabreichen, ist besondere Vorsicht erforderlich, um versehentliche Verletzungen mit der Nadel und eine Übertragung von Infektionen zu vermeiden.

Befolgen Sie Sicherheitsempfehlungen für die Entfernung und Entsorgung der Nadel (z. B. Einhand-Technik), um das Risiko einer versehentlichen Verletzung durch die Nadel und einer Übertragung von Infektionskrankheiten zu verringern.

ServiceCenter
Diabetes

0180 22 22 010

(Anruf dt. Festnetz 6 ct / Anruf, Mobilfunkpreise max. 42 ct / min)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Das ServiceCenter Diabetes steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.juniorstar.de.

