

GlucoMen® areo Kurzbedienungsanleitung

Wie Sie eine Blutzuckermessung durchführen

1



Führen Sie einen neuen GlucoMen® areo Teststreifen oben in das Messgerät ein.

2



Gewinnen Sie einen Blutstropfen.

3



Tragen Sie einen Blutstropfen auf das Ende des Teststreifens auf.

4



Nach 5 Sekunden erscheint das Messergebnis.

5



Verwenden Sie die Auswurfaste, um den verwendeten Teststreifen hygienisch zu entfernen.



GlucoMen® areo Displaymeldungen

Meldung

Was bedeutet die Meldung?

Was muss ich tun?



Hardwarefehler

Wenden Sie sich an
unser Serviceteam
Telefon: 0800-45 82 66 36
(kostenlos)



Teststreifen benutzt
oder beschädigt

Verwenden Sie einen
neuen Teststreifen



Blutprobenfehler

Auf einen neuen Teststreifen
mehr Blut auftragen



Teststreifen zu früh
entfernt

Messung mit einem neuen
Teststreifen wiederholen



NFC Verbindung
unterbrochen

Datenübertragung
wiederholen



M093571